

Fitness- und Schlafracker-Ring

mit Herzfrequenz- und SpO2-Anzeige

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

Ihr neuer Fitness- und Schlafracker-Ring..... 4

 Lieferumfang..... 4

 Optionales Zubehör 4

 Produktvarianten 4

Wichtige Hinweise zu Beginn 5

 Sicherheitshinweise 5

 Wichtige Hinweise zum Akku..... 6

 Wichtige Hinweise zur Entsorgung 7

 Konformitätserklärung 7

Produktdetails 8

Inbetriebnahme 9

 Ring aufladen 9

 Ring anlegen 9

App..... 10

 App installieren 10

 Ring mit App verbinden 10

 Steuerseite des Rings 11

 Schlafmanagement..... 14

 Fitness..... 17

 Leben 18

Technische Daten 19

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.newgen-medicals.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihr neuer Fitness- und Schlafracker-Ring

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Fitness- und Schlafracker-Rings.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Fitness-/Schlafracker-Ring optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Ring
- Ladestation mit USB-Ladekabel
- Produktinformationen

Empfohlene App

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Ring und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **AIZO Ring**.

Optionales Zubehör

- USB-Netzteil

Produktvarianten

- ZX-5543: Fitness-Ring, silber, Größe 8
- ZX-5544: Fitness-Ring, silber, Größe 10
- ZX-5545: Fitness-Ring, silber, Größe 11
- ZX-5546: Fitness-Ring, silber, Größe 12
- ZX-5547: Fitness-Ring, silber, Größe 13

- ZX-5548: Fitness-Ring, gold, Größe 8
- ZX-5549: Fitness-Ring, gold, Größe 10
- ZX-5550: Fitness-Ring, gold, Größe 11
- ZX-5551: Fitness-Ring, gold, Größe 12
- ZX-5552: Fitness-Ring, gold, Größe 13

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und / oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehör.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt oder seinem Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden. Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT:
 - an Kleinkindern oder Säuglingen
 - während einer MRT- oder CT-Untersuchung
 - in der Nähe von brennbaren oder explosiven Gasgemischen
 - wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist
- Bei Personen mit Herzrhythmusstörungen können die Messwerte verfälscht sein oder die Messung ist gar nicht möglich.
- Bei Personen, die einen niedrigen Blutdruck haben, unter Gelbsucht leiden oder Medikamente zur Gefäßkontraktion einnehmen, kann es zu fehlerhaften oder verfälschten Messungen kommen.
- Bei Patienten, denen in der Vergangenheit klinische Farbstoffe verabreicht wurden und bei Patienten mit abnormalen Hämoglobinvorkommen ist mit einer Messverfälschung zu rechnen.
- Achten Sie beim Laden an einer Steckdose darauf, dass das Produkt an einer Steckdose geladen wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Produkt im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Produktes nie mit nassen Händen aus der Steckdose.

- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch oder bei Störungen während des Betriebs den Netzstecker des Geräts.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zum Akku

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter-verwendet werden.
- Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladestecker-Anschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich die Produkte ZX-5543-675, ZX-5544-675, ZX-5545-675, ZX-5546-675, ZX-5547-675, ZX-5548-675, ZX-5549-675, ZX-5550-675, ZX-5551-675 und ZX-5552-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.


Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support.
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-5543, ZX-5544, ZX-5545, ZX-5546, ZX-5547, ZX-5548, ZX-5549, ZX-5550, ZX-5551 oder ZX-5552 ein.



Produktdetails

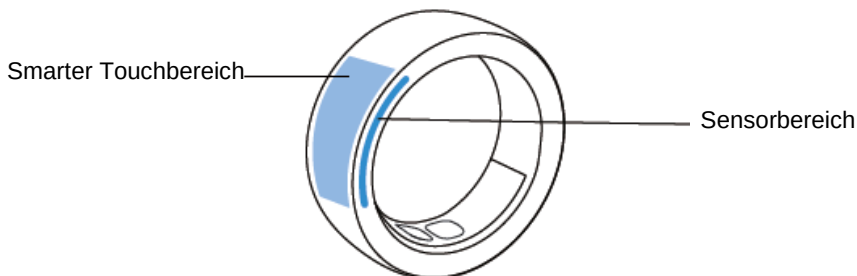

HINWEIS:

Nachdem die Smart-Touch-Funktion aktiviert ist, können Sie durch Berühren des Touchbereichs Apps von Drittanbietern über Ihren Fitness-/Schlaftracker-Ring steuern. Bitte achten Sie beim Anlegen und Tragen des Fitness-/Schlaftracker-Rings auf die richtige Ausrichtung. Der Fitness-/Schlaftracker-Ring sollte am Zeigefinger getragen werden und der Sensor-bereich sollte sich auf der Innenseite des Fingers befinden.

Inbetriebnahme

Ring aufladen

Laden Sie Ihren Fitness-/Schlaftracker-Ring vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.


1. Platzieren Sie Ihren Fitness- und Schlaftracker-Ring auf der Ladestation. Ein integrierter Magnet richtet ihn selbstständig am Ladekontakt aus.



2. Verbinden Sie die Ladestation mit einem geeigneten USB-Netzteil, z.B. von Ihrem Smartphone.
3. Während des Ladevorgangs blinkt eine rote LED auf der Ring-Innenseite.
4. Sobald der Fitness- und Schlaftracker-Ring vollständig aufgeladen ist, blinkt die Status-LED grün. Nehmen Sie den Fitness- und Schlaftracker-Ring von der Ladestation.

Ring anlegen

Der Fitness-/Schlaftracker-Ring sollte am Zeigefinger getragen werden und der Sensorbereich sollte sich auf der Innenseite des Fingers befinden.

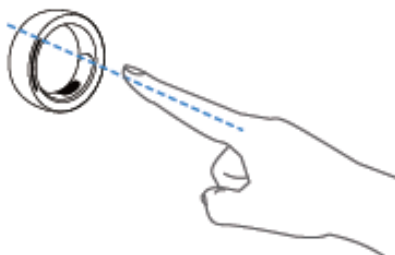

App

App installieren

Zur Steuerung per Mobilgerät benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Fitness- und Schlafracker-Ring und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **AIZO Ring**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS). Installieren Sie die App dann auf Ihrem Mobilgerät.

Ring mit App verbinden

1. Schalten Sie Bluetooth und die Ortungs-Funktion auf Ihrem Mobilgeräte ein. Die Ortungs-Funktion wird nur zum erstmaligen Verbinden benötigt und kann anschließend auf dem Mobilgerät wieder deaktiviert werden.
2. Platzieren Sie Ihren Fitness- und Schlafracker-Ring auf der Ladestation.
3. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Mobilgerät und lassen Sie nach neuen Gerätenm suchen.
4. Tippen Sie in der Geräteliste auf den Fitness- und Schlafracker-Ring mit der Bezeichnung **Metal Fitness Ring** und bestätigen Sie Das Koppeln.
5. Öffnen Sie nach dem Koppeln die App **AIZO Ring**.
6. Tippen Sie dann auf **Jetzt hinzugefügt** und dann auf **Gerät hinzufügen**. Der Ring wird gesucht.
7. Tippen Sie den Ring in der Geräte-Liste der App an. Er wird nun mit der App gekoppelt.
8. Geben Sie nach dem Koppeln zur besseren Auswertung Ihrer ermittelten Daten die hierfür erforderlichen persönlichen Informationen ein und bestätigen Sie Ihre Eingaben mit **OK**.
9. Tippen Sie zuletzt auf **Loslegen**. Sie gelangen zur Steuerseite des Rings.



HINWEIS:

Wenn Sie die Verbindung zu einem späteren Zeitpunkt aufheben möchten, tippen Sie in der App auf **Ring entbinden** (Unbind Ring). Falls Sie ein iPhone verwenden, müssen Sie Ihren Ring zusätzlich auch manuell aus der Liste der gekoppelten Geräte in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Mobilgeräts entfernen.


Steuerseite des Rings



HINWEIS:


Apps werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Es kann daher vorkommen, dass die Beschreibung der App in dieser Bedienungsanleitung nicht mehr der aktuellen App-Version entspricht.

- Steuern Sie Ihren Fitness-/Schlaftracker-Ring, indem Sie auf das entsprechende Symbol tippen.

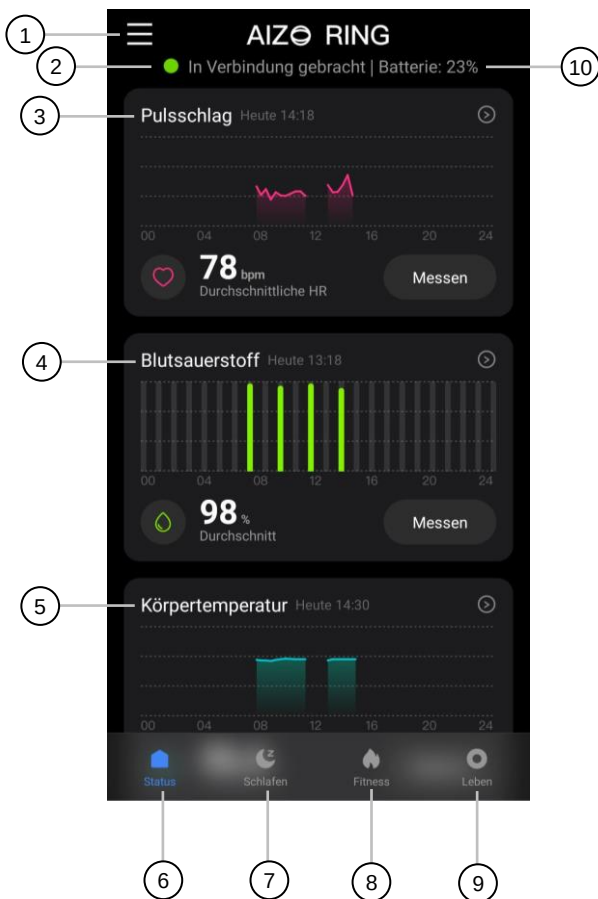

1. Menü
2. Verbindungsstatus
3. Pulsschlag
4. Blutsauerstoff
5. Körpertemperatur

6. Status
7. Schlafen
8. Fitness
9. Leben
10. Akkukapazität

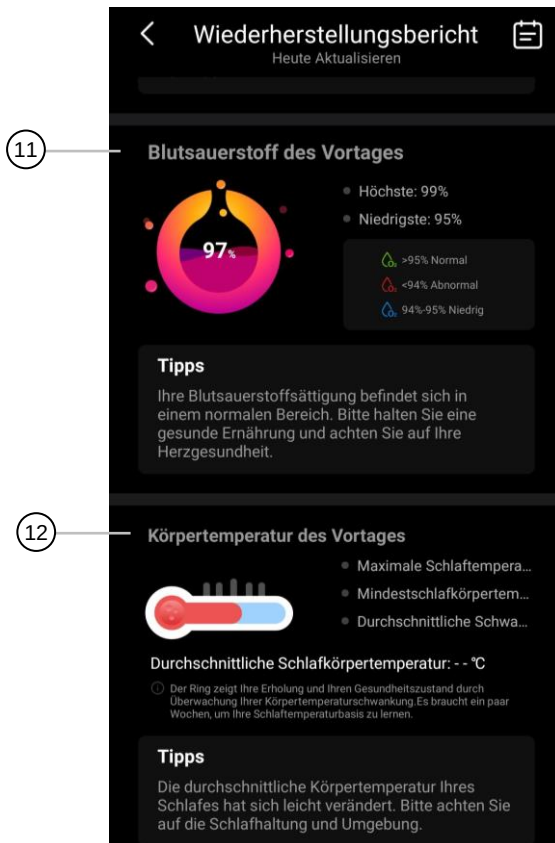

11. Blutsauerstoff des Vortages


12. Körpertemperatur des Vortages





13. Aktivität des Vortages

14. Herzfrequenz des Vortages

Schlafmanagement

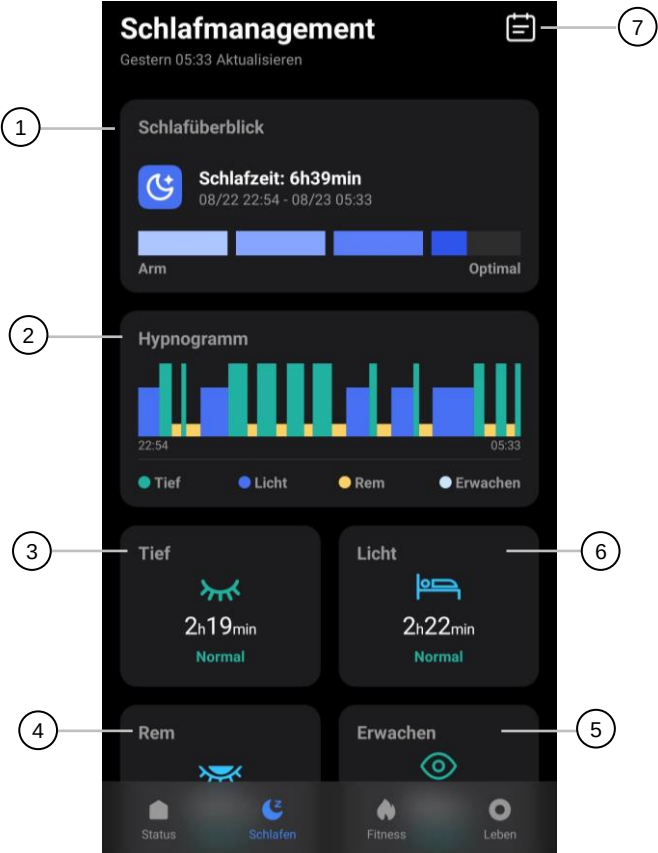

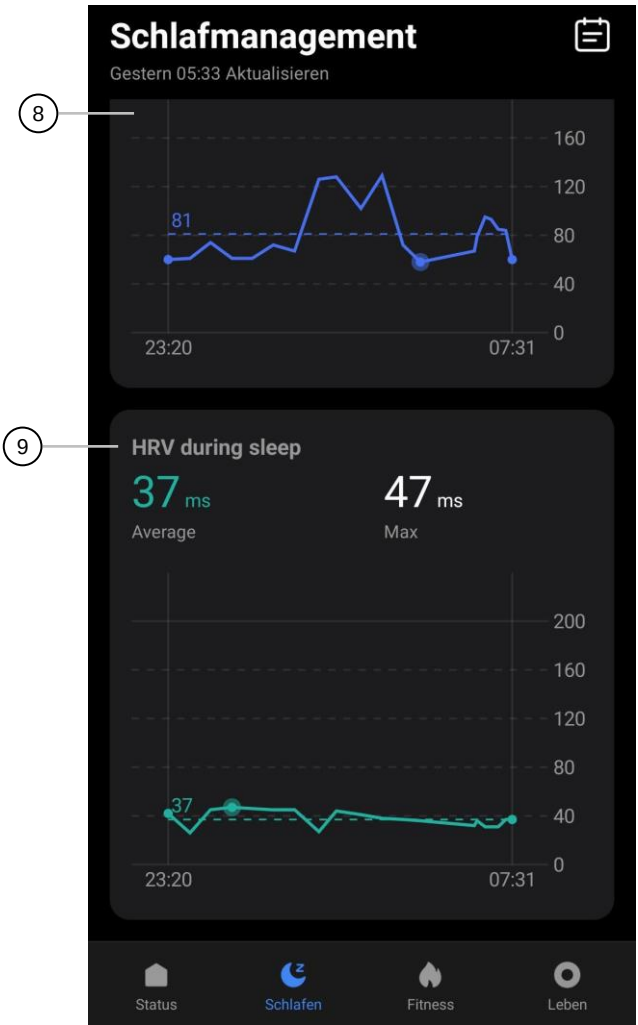

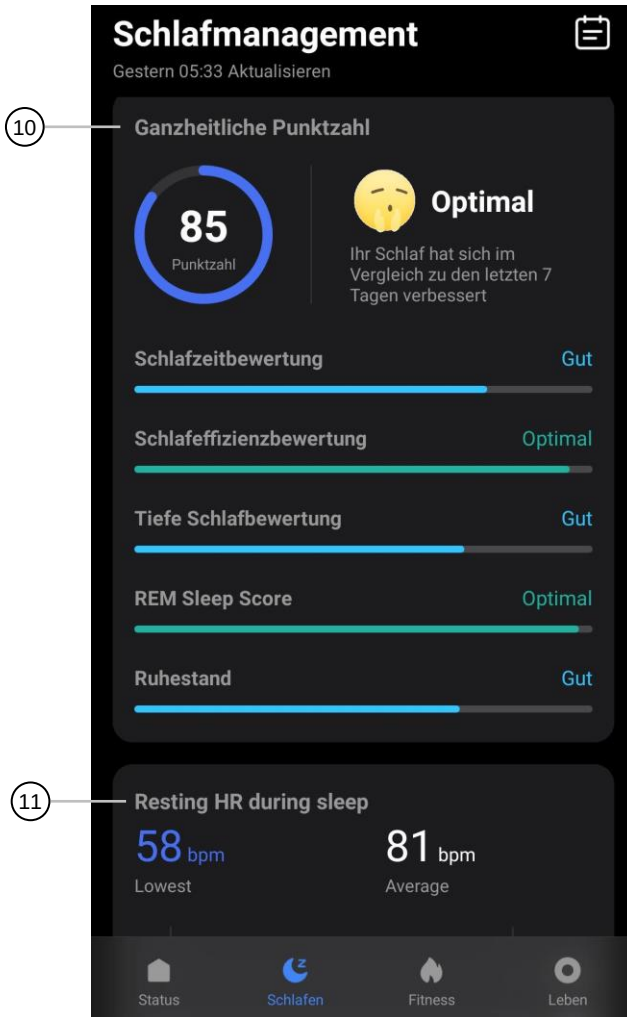


- | | |
|--------------------|--|
| 1. Schlafüberblick | 7. Aktivitätskalender |
| 2. Hypnogramm | 8. Schlafübersicht |
| 3. Tiefschlaf | 9. Herzfrequenzvariabilität während Schlaf |
| 4. Rem-Schlaf | 10. Schlafbewertung |
| 5. Wachzeiten | 11. Herzrate während Schlaf |
| 6. Leichter Schlaf | |

Fitness



1. Tägliche Aktivitäten
2. Sportaufzeichnungen
3. Sportbewertung

Leben

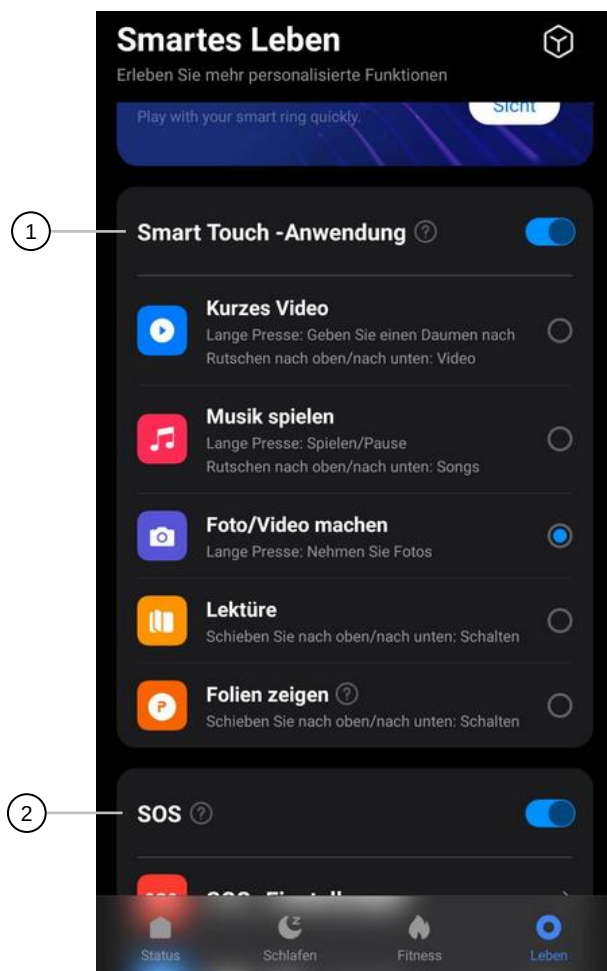

1. Smart-Touch-Anwendung
aktivieren/deaktivieren

2. SOS-Funktionen
aktivieren/deaktivieren

Technische Daten

Akku	Typ	Lithium-Polymer
	Kapazität	16 mAh
Input Ladestation		5V DC (per USB)
Output-Ladestation		5 Volt DC
Funk-Frequenz		2.400 – 2.483,5 MHz
Sendeleistung		max. 4 dBm
Schutzklasse		III (Schutz durch Kleinspannung)
Schutzklasse Bildzeichen		
Schutzart		IP68
Innendurchmesser 	ZX-5543 ZX-5548	18,2 mm
	ZX-5544 ZX-5549	20,1 mm
	ZX-5545 ZX-5550	20,7 mm
	ZX-5546 ZX-5551	21,7 mm
	ZX-5547 ZX-5552	22,3 mm

Kundenservice:

DE: +49(0)7631-360-350

CH: +41(0)848-223-300

FR: +33(0)388-580-202

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV1 – 08.02.2024 – JvdH//MF

Bague fitness

Mode d'emploi



Table des matières

Votre nouvelle bague fitness	4
Contenu	4
Accessoires en option.....	4
Variantes du produit.....	4
Consignes préalables	5
Consignes de sécurité	5
Consignes importantes sur les batteries.....	6
Consignes importantes pour le traitement des déchets	6
Déclaration de conformité.....	7
Description du produit.....	8
Mise en marche	8
Charger l'anneau	8
Enfiler l'anneau.....	8
Application	9
Installer l'application	9
Connexion à l'application.....	9
Page de commandes.....	10
Gestion du sommeil.....	13
Fitness	16
Vie	17
Caractéristiques techniques	18

Votre nouvelle bague fitness

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet anneau fitness.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Anneau
- Station de chargement USB avec câble de chargement
- Mode d'emploi

Application recommandée

Une application est requise afin d'établir une connexion entre le produit et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **AIZO Ring**.

Accessoires en option,

disponibles séparément sur www.pearl.fr :

- Chargeur secteur USB

Variantes du produit

- ZX5543 : Bague fitness coloris argenté taille 8
- ZX5544 : Bague fitness coloris argenté taille 10
- ZX5545 : Bague fitness coloris argenté taille 11
- ZX5546 : Bague fitness coloris argenté taille 12
- ZX5547 : Bague fitness coloris argenté taille 13
- ZX5548 : Bague fitness coloris doré taille 8
- ZX5549 : Bague fitness coloris doré taille 10
- ZX5550 : Bague fitness coloris doré taille 11
- ZX5551 : Bague fitness coloris doré taille 12
- ZX5552 : Bague fitness coloris doré taille 13

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Utilisez uniquement les accessoires originaux.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
- N'utilisez pas le produit après un dysfonctionnement, par exemple s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été endommagé.
- N'utilisez pas l'appareil si :
 - sur les enfants en bas-âge et les nourrissons
 - pendant une IRM ou TDM
 - à proximité de mélanges gazeux inflammables ou explosifs.
 - si l'appareil est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- La mesure peut être faussée voire impossible chez les personnes présentant des perturbations du rythme cardiaque.
- Les mesures peuvent notamment être erronées ou faussées chez les personnes présentant une circulation sanguine réduite ou une jaunisse, ou prenant des vasodilatateurs.

- Des erreurs peuvent survenir pour les résultats obtenus chez les personnes auxquelles l'on a administré des produits de contraste par le passé, ou chez les personnes présentant une production d'hémoglobine anormale.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- Ne débranchez jamais la fiche du produit avec des mains mouillées.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Veillez à ne pas plier, écraser ou pincer le câble d'alimentation. Ne l'exposez ni à des sources de chaleur, ni à des objets tranchants. Il ne doit pas devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant le fonctionnement et avant chaque nettoyage.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes sur les batteries

- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : Risque d'explosion et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'essayez jamais d'ouvrir les batteries.
- Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température.
- N'exposez pas la batterie à des charges mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- Respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur pour le chargement des accumulateurs. Un mauvais branchement du connecteur de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée créent un risque de court-circuit et d'explosion !
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits ZX-5543, ZX-5544, ZX-5545, ZX-5546, ZX-5547, ZX-5548, ZX-5549, ZX-5550, ZX-5551 et ZX-5552 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE + (EU)2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz A.


Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Description du produit

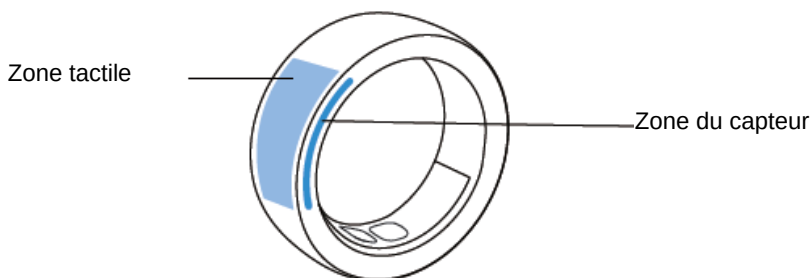

NOTE :

Une fois la fonction Smart-Touch activée, vous pouvez contrôler des applications tierces avec votre anneau en touchant la zone tactile. Faites attention à l'orientation de l'anneau lorsque vous le mettez et le portez. L'anneau doit être porté à l'index et la zone du capteur doit se trouver à l'intérieur du doigt.

Mise en marche

Charger l'anneau

Avant la première utilisation, rechargez complètement l'anneau.


1. Placez l'anneau sur la station de chargement. Un aimant intégré l'aligne automatiquement sur le contact de chargement.



2. Branchez la station de chargement à un adaptateur secteur USB, par exemple celui de votre smartphone.
3. Pendant le chargement, une LED rouge clignote à l'intérieur de l'anneau.
4. Dès que l'anneau est entièrement chargé, la LED clignote en vert. Retirez l'anneau de la station de chargement.

Enfiler l'anneau

L'anneau doit être porté à l'index et la zone du capteur doit se trouver à l'intérieur du doigt.

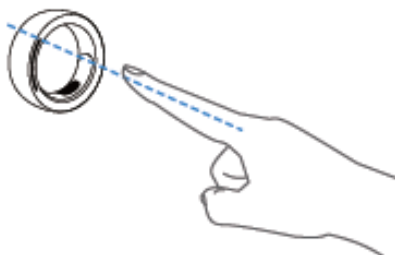

Application

Installer l'application

Pour utiliser le produit avec l'application mobile, vous avez besoin d'une application capable d'établir une connexion entre le produit et votre appareil mobile.

Nous recommandons l'application gratuite **AIZO Ring**. Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS). Installez l'application sur votre appareil mobile.

Connexion à l'application

1. Allumez la fonction bluetooth et la fonction localisation de votre appareil mobile. La fonction localisation est nécessaire pour la connexion. Elle peut être désactivée sur l'appareil mobile par la suite.
2. Placez l'anneau sur la station de chargement.
3. Ouvrez les paramètres bluetooth de votre appareil mobile et recherchez de nouveaux appareils.
4. Dans la liste des appareils, appuyez sur la bague intitulée **Metall Fitness Ring** et confirmez l'appariement.
5. Une fois l'appariement effectué, ouvrez l'application **AIZO Ring**.
6. Appuyez ensuite sur **Ajouter maintenant**, puis sur **Ajouter un appareil**. L'anneau est recherché.
7. Appuyez sur la bague dans la liste des appareils de l'application. Elle se connecte à l'application.
8. Après l'appariement, saisissez vos informations personnelles. Elles sont nécessaires à une meilleure évaluation de vos données. Confirmez vos saisies en cliquant sur OK.
9. Appuyez enfin sur Démarrer. Vous accédez à la page de contrôle de l'anneau.



NOTE :

Si vous souhaitez vous déconnecter par la suite, appuyez sur Déconnecter l'anneau (Unbind Ring) dans l'application. Si vous utilisez un iPhone, vous devez également supprimer manuellement votre anneau de la liste des appareils appariés dans les paramètres Bluetooth de votre appareil mobile.


Page de commandes




NOTE :

L'application est continuellement améliorée. Par conséquent, il est possible que la description de l'application de ce mode d'emploi ne corresponde pas à la version de l'application la plus récente.

- Contrôlez le produit connecté en appuyant sur l'icône correspondante.

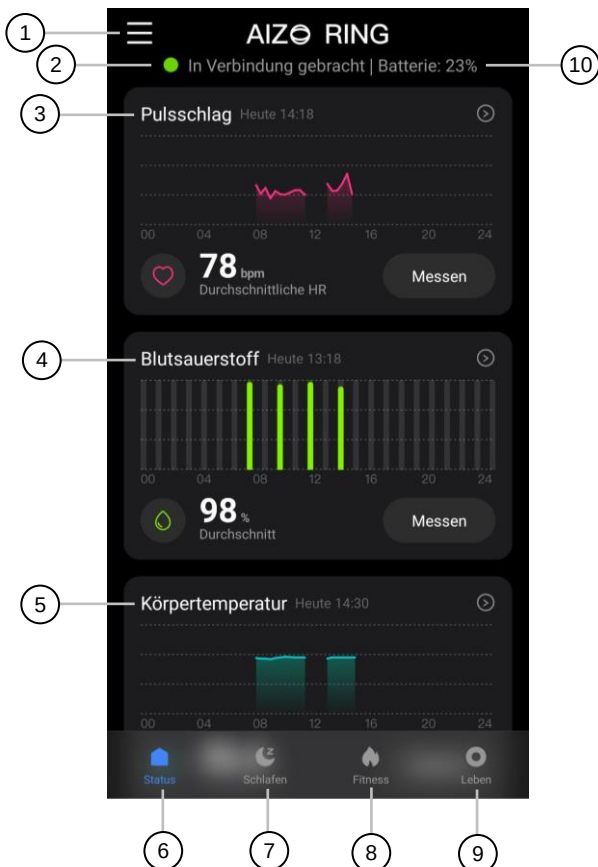

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Menu | 6. Statut |
| 2. État actuel de la connexion | 7. Sommeil |
| 3. Pouls | 8. Fitness |
| 4. Saturation en oxygène | 9. Vie |
| 5. Température corporelle | 10. Capacité de la batterie |

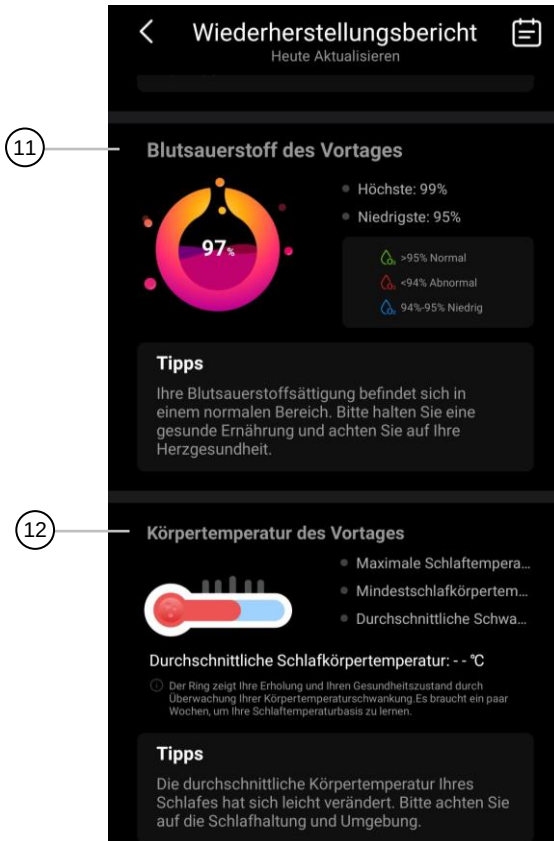

11. Saturation en oxygène de la veille


12. Température corporelle de la veille





13. Activité de la veille

14. Fréquence cardiaque de la veille

Gestion du sommeil

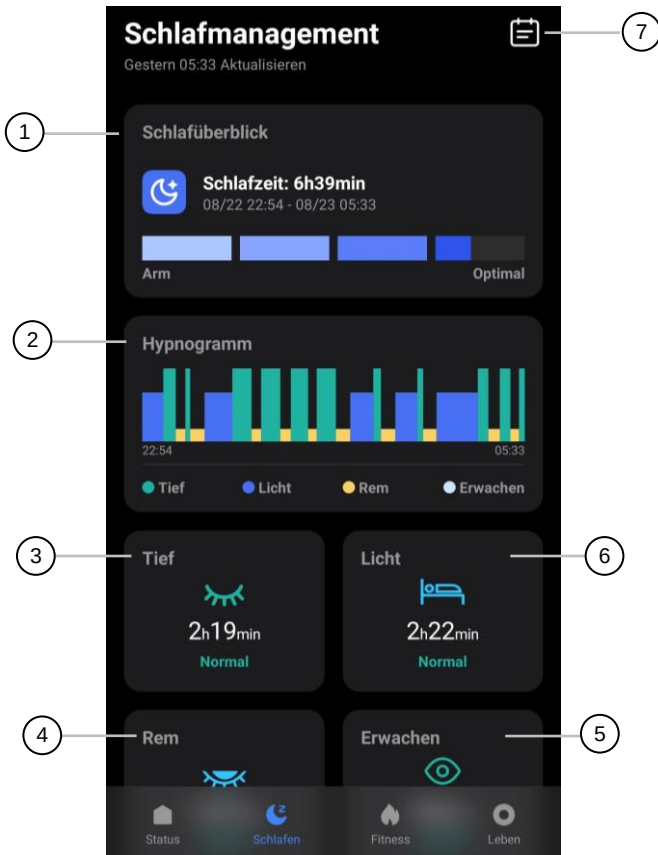

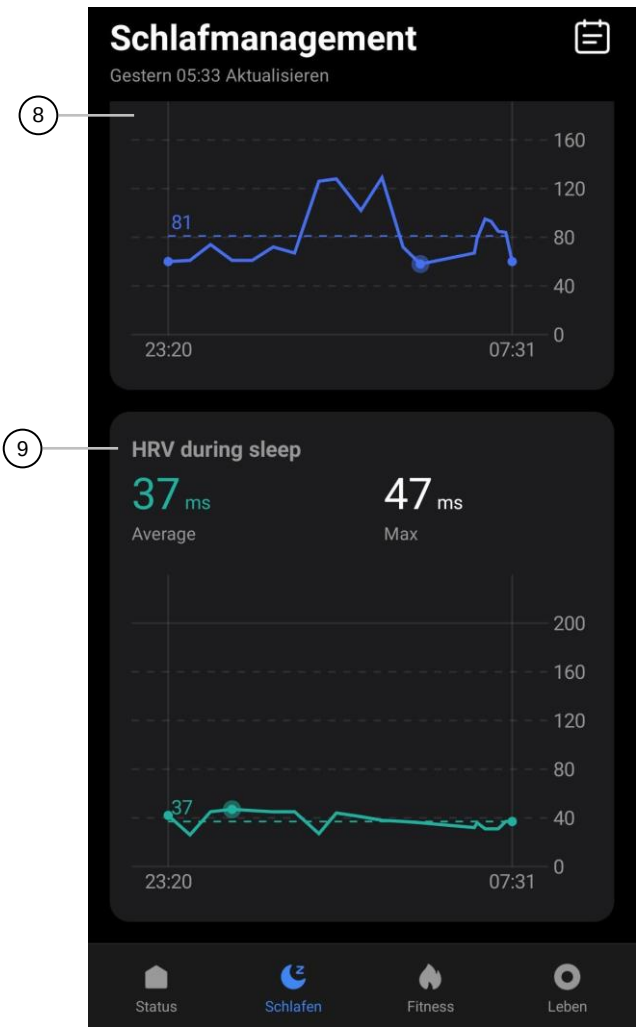

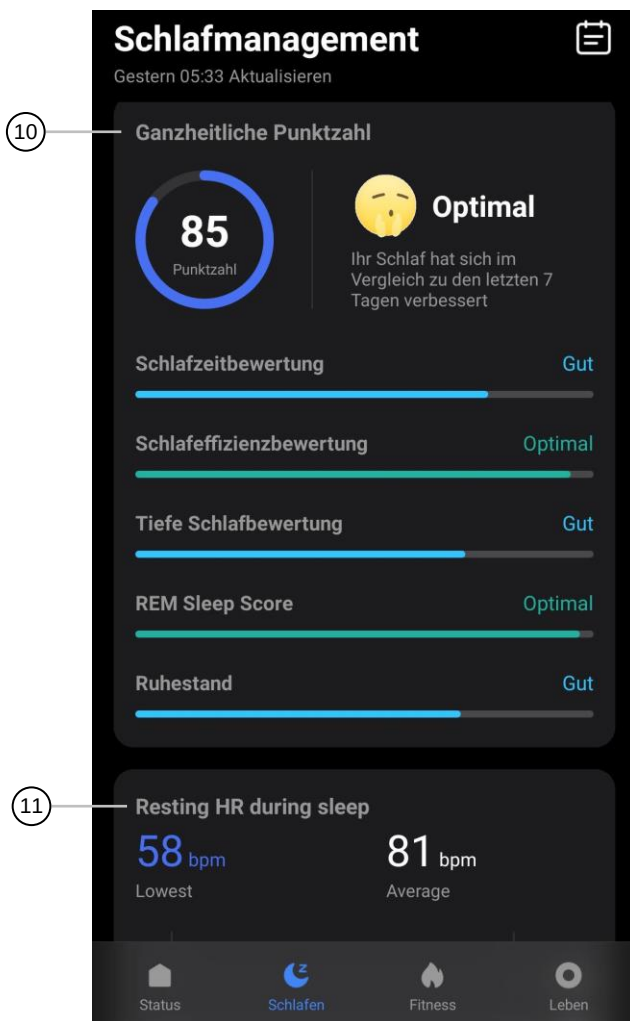


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Aperçu | 7. Calendrier d'activité |
| 2. Hypnogramme | 8. Aperçu |
| 3. Sommeil profond | 9. Fluctuation de la fréquence cardiaque pendant le sommeil |
| 4. Sommeil paradoxal | 10. Qualité de sommeil |
| 5. Temps d'éveil | 11. Fréquence cardiaque pendant le sommeil |
| 6. Sommeil léger | |

Fitness



1. Activité quotidienne
2. Enregistrements sportifs
3. Évaluation sportive

Vie

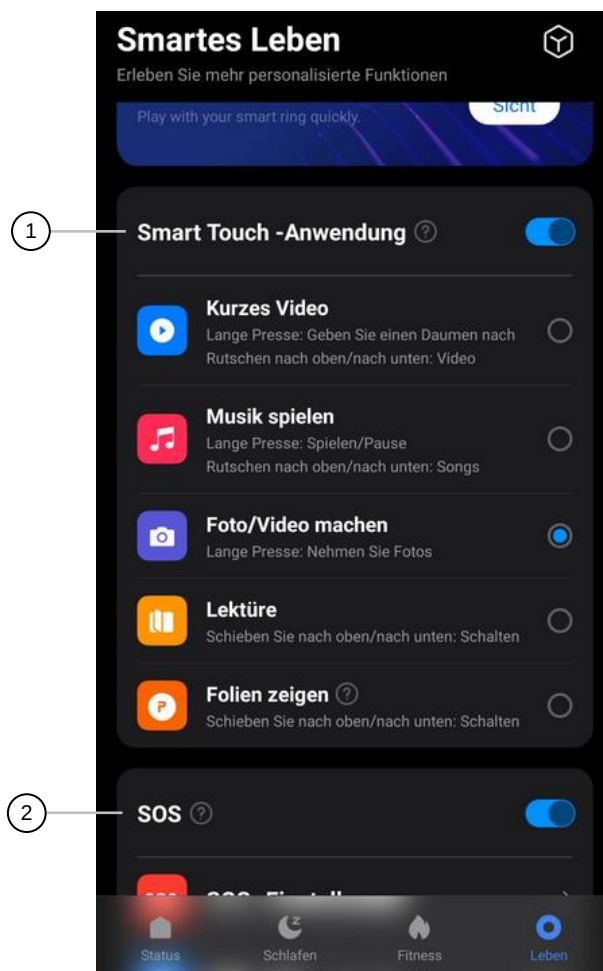

1. Activer / désactiver l'application Smart-Touch
2. Activer / désactiver la fonction SOS

Caractéristiques techniques

Batterie	Type	Lithium-polymère
	Capacité	16 mAh
Entrée station de chargement		5 V DC (par USB)
Sortie station de chargement		5 V DC
Fréquence sans fil		2400 à 2483,5 MHz
Puissance d'émission		Max. 4 dBm
Classe de protection		III, protection par basse tension
Symbole classe de protection		
Indice de protection		IP68
Diamètre intérieur 	ZX5543 ZX5548	18,2 mm
	ZX5544 ZX5549	20,1 mm
	ZX5545 ZX5550	20,7 mm
	ZX5546 ZX5551	21,7 mm
	ZX5547 ZX5552	22,3 mm

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02
© REV1 – 08.02.2024 – JvdH//MF