

# Bluetooth Körperanalysewaage



Reference: DOM455  
Version: 1.4  
Language: Deutsch

## Bedienungsanleitung

Wir danken Ihnen für den Kauf des LIVOO Produktes und das Vertrauen, dass Sie in uns setzen. Sicherheit, Ergonomie und Design – das sind die Stichworte, die wir unseren Designern ins Lastenheft geschrieben haben. Wir hoffen, Ihnen ein Produkt zu bieten, das Ihnen im Laufe der Zeit vollständige Zufriedenheit bieten wird.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar [www.livoo.fr](http://www.livoo.fr)

**LESEN SIE DIESE ANLEITUNG VOR DEM GEBRAUCH DES GERÄTS SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE FÜR DEN SPÄTEREN GEBRAUCH AUF.**

### SICHERHEITSHINWEISE

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, UM DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG VOR DER ERSTEN NUTZUNG DES PRODUKTS SORGFÄLTIG ZU LESEN. Eine missbräuchliche Verwendung des Gerätes kann das Gerät beschädigen oder den Benutzer verletzen. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät für den Verwendungszweck nutzen, für den es entworfen wurde. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden (Rückerstattung), die durch eine falsche Verwendung oder unsachgemäße Handhabung verursacht wurden.

1. Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt vorgesehen. Jede sonstige Nutzung (medizinisch, beruflich, kommerziell, etc.) ist ausgeschlossen.
2. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
3. Verwenden Sie das Gerät stets im Innenbereich und an einem trockenen Ort.
4. Niemals das Gerätegehäuse in Wasser oder eine andere Flüssigkeit tauchen.
5. Stellen Sie keine Gegenstände auf der Waage ab.

## Bedienungsanleitung

6. Um ein Verletzungsrisiko zu vermeiden, stellen Sie sich nicht auf die Randbereiche der Waage.
7. Um ein Ausrutschen zu verhindern, achten Sie darauf, dass Ihre Füße und die Waage trocken und frei von Staub sind, bevor Sie sich auf die Waage stellen.
8. Versuchen Sie nicht die Waage zu zerlegen.
9. Vermeiden Sie starke Vibrationen oder Stöße, wie ein Fallenlassen der Waage.
10. Stellen Sie die Waage auf eine harte, ebene Oberfläche. Vermeiden Sie Teppiche und Matten.
11. Die Waage nicht auf einem rutschigem Untergrund verwenden oder auf nassen Böden.
12. Die Waage von Wärmequellen (Heizungen etc.) fernhalten, um eine Verformung der Kunststoffteile zu vermeiden.
13. Die Waage niemals in aufrechter Position lagern.
14. Verwenden Sie nur den Batterietyp, wie in dieser Anleitung angegeben.
15. Ersetzen Sie die Batterie, wenn diese leer ist oder ausläuft.
16. Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird, entnehmen Sie bitte die Batterie.
17. Zerlegen Sie die Waage nicht, da eine unsachgemäße Ausführung zu Personenverletzungen oder zu einer Beschädigung der Waage führen könnte.

## Hauptmerkmale

- Hochpräzises DMS-Sensor-System zur Gewährleistung genauer Ergebnisse
- Kapazität: 6 kg - 180 kg
- Skalenteilung: 50 g
- Verschiedene mögliche Profile

## Bedienungsanleitung

- Baby-Modus
- LED-Anzeige
- Automatische Ein-/Abschaltung
- Anzeige für niedrigen Batteriestand/Überlast
- Umschaltung zwischen drei verschiedenen Einheiten: Kilogramm (kg) / Pfund (lb) / Stone (st)
- 3 x 1,5 V Batterien, Typ AAA im Batteriefach auf der Rückseite (Polarität beachten)

Um die Batterien zu wechseln, öffnen Sie die Abdeckung auf der Rückseite, legen Sie die Batterien in das Batteriefach ein und schließen Sie die Abdeckung.


### Achtung

1. Bitte ziehen Sie vor dem Wiegen Ihre Schuhe aus, um eine Verkratzen der Glasplatte zu vermeiden.
2. Die Glasplatte kann rutschig sein, wenn sie nass ist. Stellen Sie sicher, dass das Glas und die Füße trocken sind, bevor Sie sich auf die Waage stellen.
3. Verwenden Sie ein weiches Tuch mit einem alkoholhaltigen Reinigungsmittel, um die Oberfläche zu reinigen. Keine Verwendung von Seifen oder anderen Chemikalien. Halten Sie das Gerät von Wasser, extremer Hitze oder Kälte geschützt.
4. Die Waage ist ein Hochpräzisionsmessgerät. Springen Sie niemals auf die Waage, zerlegen Sie niemals die Waage und handhaben Sie das Gerät vorsichtig, um ein Fallenlassen des Geräts zu vermeiden.
5. Die Waage ist nur für den Heimgebrauch bestimmt und nicht für den kommerziellen Einsatz geeignet.
6. Bitte prüfen Sie die Batterien, falls die Waage nicht richtig funktioniert. Ersetzen Sie gegebenenfalls die Batterien. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Händler oder direkt an unser Unternehmen per Telefon oder E-Mail.

## BESCHREIBUNG

### Frontplatte:

1. LED-Display
2. Metallsensoren
3. Wiegefläche
4. Batteriefach (Rückseite)  
und Einheitenwechsel (kg/lb/st)

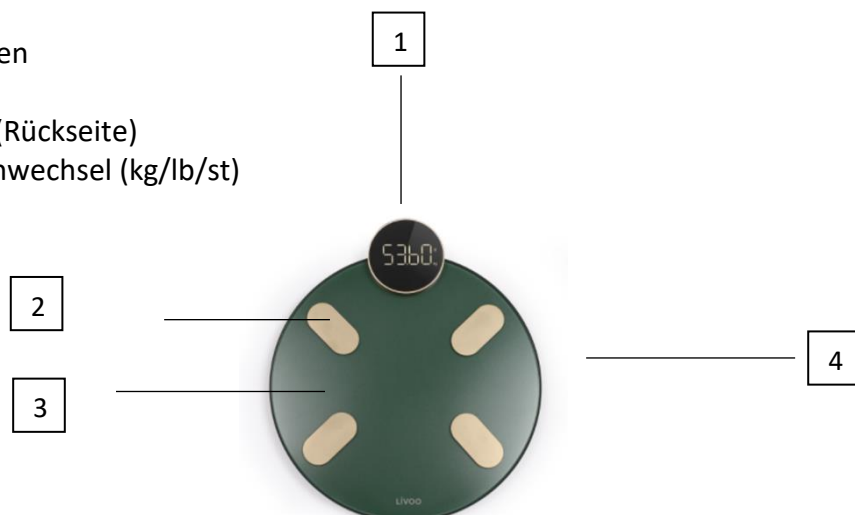

# **LIVOO**

Feel good moments

## Bedienungsanleitung

Aufgrund kontinuierlicher Weiterentwicklungen am Produkt können die Produktangaben ohne Vorankündigung geändert werden.

Das Aussehen und die Farbe des Produkts können entsprechend dem jeweiligen Produkt abweichen.

### **Stromversorgung**

Öffnen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Waage und legen Sie die Batterien unter Beachtung der korrekten Polarität in das Batteriefach ein. Bitte beachten Sie, dass das Einlegen der Batterien mit falscher Polarität zu Schäden an den elektronischen Teilen der Waage führt.

Hinweis: Neue und alte Batterien können nicht zusammen verwendet werden. Für dieses Gerät können keine wiederaufladbaren Batterien verwendet werden.

Stellen Sie vor dem Einlegen der Batterien sicher, dass die Batteriekontaktstellen des Geräts sauber sind.

- Bitte entnehmen Sie die Batterien, wenn diese entladen sind oder falls Sie die Waage für längere Zeit nicht benutzen.

### **Empfehlungen:**

- Dieses Gerät dient zur Bestimmung des Körpergewichts sowie der Analyse der Anteile von Körperwasser, Körperfett sowie der Muskel- und Knochenmasse im Körper. Es kann ebenfalls der Body-Mass-Index berechnet werden (BMI).
- Die Körperanalysefunktion ist für Personen im Alter von unter 10 Jahren oder über 70 Jahren nicht geeignet. Wir empfehlen, dass die Personen von unter 10 Jahren oder über 70 Jahren .... Wir empfehlen, dass diese Personen nur die herkömmliche Gewichtsfunktion verwenden.
- Die BMI-Funktion ist nur geeignet für die Berechnung des Idealgewichtes für Erwachsene ab einem Alter von 18 Jahren. Die App kann diese Funktion nicht für Personen unter 18 Jahre anzeigen.
- Bitte beachten Sie, dass die berechneten Ergebnisse nur Referenzwerte darstellen und als Richtlinie zu betrachten sind. Darüber hinaus können unterschiedliche Werte bei Leistungssportlern oder bei Menschen auftreten, die eine medikamentöse Behandlung erhalten. Es wird ausdrücklich empfohlen, die Ergebnisse nicht als Grundlage für jede Form einer medizinischen Behandlung oder Ernährungsweise heranzuziehen! Sie müssen Ihren Arzt konsultieren, falls Sie Fragen zu Ihrem Gewicht, einer medizinischen Behandlung oder einer Ernährungsweise haben.

**Hinweis: Die Funktionen der Körperanalysewaage ist für die folgenden Personen nicht geeignet:**

- **Personen mit einem Herzschrittmacher oder einem sonstigen medizinisches Implantat mit elektronischen Bauteilen. Die korrekte Funktionsweise des Implantats könnte beeinträchtigt werden oder gefährdet sein.**
- **Personen mit Symptomen wie Fieber, Ödemen oder Osteoporose.**
- **Personen, die sich in Dialysebehandlung befinden.**
- **Menschen, die Herz-Kreislauf- Medikamente einnehmen.**

## Bedienungsanleitung

- Die maximale Belastung der Waage entspricht einem Körpergewicht von 180 kg. Ein höheres Gewicht kann das Gerät beschädigen.
- Wiegen Sie sich ohne Kleidung und barfuß. Für einen einfacheren Ergebnisvergleich, ist es ratsam, sich stets zur gleichen Tageszeit zu wiegen (vorzugsweise abends, vor dem Essen) sowie unter den gleichen Umständen.
- Stellen Sie sich ordnungsgemäß auf die Kontaktflächen.
- Die Messung des Körperfetts, Wassergehalts sowie der Muskel- und Knochenmasse ist nur barfuß möglich.

**Hinweis:** Die Waage rundet das Gewicht in Schritten von 100 g auf und besitzt ein Mindestgewicht von 6 kg.

## Anzeigen

Verschiedene Anzeigen:

- |                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| • Gewicht             | • Muskelmasse               |
| • BMI                 | • Knochenmasse              |
| • Viszerales Fett     | • Proteingehalt             |
| • Körperfett in %     | • Grundumsatz (Grundumsatz) |
| • Körperwasser        | • Körperliches Alter        |
| • Skelettmuskelanteil | • Körpergröße               |

Die Waage kann mehrere Profile speichern.

Für folgende Personen könnte es zu Messfehlern kommen:

- professionelle Sportler oder Sportler mit einem hohem, intensiven Sportniveau;
- über 70 Jahre alt;
- unter 10 Jahre alt.

Allerdings bleibt die so genannte „normale“ Gewichtsfunktion verfügbar.

## VERWENDUNG DES GERÄTS

**Herkömmliches Wiegen** (ohne IOS/Android):

1. Stellen Sie die Waage auf einen trockenen und festen Untergrund (Teppiche vermeiden).
2. Tippen Sie Ihren Fuß auf die Waage, um das Display einzuschalten.
3. Warten Sie, bis die Anzeige „0,0“ (kg/lb/st) ausgibt. **Hinweis:**

Hinweis: Bei Bedarf können Sie die zu verwendende Masseinheit für das Gerät auswählen: Kilogramm (kg), Pfund (lb) oder Stone (st).



## Bedienungsanleitung

4. Stellen Sie sich auf die Waage.

Hinweis: Für ein genaues Ergebnis, stellen Sie sich bitte in die Mitte auf die Wiegeplatte und bewegen Sie sich nicht.

5. Sobald das Körpergewicht berechnet wurde, beginnt die Nummer auf dem Display aufzublinken. Sie können nun von der Waage steigen.
6. Die Waage schaltet sich nach kurzer Zeit automatisch aus.

### Wiegen Sie sich mit der Anwendung

1. Wählen Sie den Benutzer aus, indem Sie auf Me--> Manage Users klicken, und fügen Sie dann persönliche Daten hinzu. Die Waage kann erkennen, welcher Benutzer sie betritt und den Benutzer daran erinnern, den richtigen Benutzer zu ändern.
2. Stellen Sie die Waage auf eine flache, stabile und trockene Oberfläche.
3. Berühren Sie die Waage mit Ihrem Fuß, um den Bildschirm zu aktivieren.
4. Warten Sie, bis das Display '0.0' (kg/lb/st) anzeigt.

Hinweis: Falls erforderlich, können Sie die gewünschte Maßeinheit wählen, Kilogramm (kg) in Pfund (lb) oder Stein (st). Die Umstellung erfolgt mit der Taste auf der Rückseite des Geräts.

5. Stellen Sie sich barfuß auf die Waage.

Hinweis: Um ein genaues Ergebnis zu erhalten, stellen Sie sich bitte ruhig auf die Sensoren der Waage.

6. Die Zahl auf dem Display blinkt, wenn die Waage wiegt und analysiert.
7. Stellen Sie sich weiter auf die Waage, bis auf der Anwendung der Kreis stabil ist und "Test abgeschlossen" anzeigt. Ihr Telefon hat alle Daten von der Waage empfangen.
8. Wenn das Gewicht ermittelt ist, erscheint es auf dem Display und Sie finden alle Daten.
9. Die Waage schaltet sich nach ein paar Sekunden aus.

## Einstellung und Speicherung der persönlichen Daten im Speicher.

Um alle Funktionen Ihrer Waage verwenden zu können, müssen Sie die „Fitdays“-App aus dem APP Store oder vom Google Play Store herunterladen. Sie können ebenfalls den QR-Code einscannen, um die App herunterzuladen. Ohne die APP können Sie nur die Gewichtungsfunktion für kg verwenden.



Feel good moments

## Bedienungsanleitung

QR-CODE :



Aktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion auf Ihrem Telefon oder Tablet, um die APP zu nutzen.

### Kompatibilität:

Die Bluetooth®-Körpergesundheitswaage mit ist für die Verwendung von Mobilgeräten mit dem iOS/Android-System bestimmt.

| iOS                       | Android                  |
|---------------------------|--------------------------|
| BT 8.0 oder neuere Geräte | BT6.0 oder neuere Geräte |

Laden Sie die APP „Fitdays“ herunter, bevor Sie die Waage mit Ihrem IOS/Android-Gerät koppeln. Sie haben die Möglichkeit 8 Profile in dieser APP zu erstellen.

### Erstellung eines Profils:

Sie können direkt nach der Registrierung Ihr eigenes Benutzerprofil in der APP eingeben. Sobald Sie alle Daten eingegeben haben, wählen Sie „FERTIG“ aus. Sie werden automatisch in das Hauptmenü weitergeleitet. Weitere Benutzerprofile können über die Plus-Taste in Ihrem Profil erstellt werden.

### Verschiedene Schritte zur Kopplung Ihres Telefons oder Tablets mit der „Fitdays“-APP

1. Stellen Sie sicher, dass das Netzwerk Ihres Smartphones oder Tablets ordnungsgemäß funktioniert.
2. Erstellen Sie ein Konto mit Ihrer E-Mail-Adresse.
3. Geben Sie Ihre korrekten persönlichen Informationen ein, einschließlich Geschlecht, Größe und Alter.
4. Achten Sie darauf, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Handys aktiviert ist, und dass die GPS-Lokalisierung ebenfalls aktiviert ist, falls das Handy mit einem Android-System ausgestattet ist.
5. Stellen Sie sich auf die Waage, um sie einzuschalten, die Startseite wird „Verbunden“ ausgeben. Dies bedeutet, dass die automatische Kopplung erfolgreich war. Falls die Startseite „Nicht verbunden“ anzeigt, klicken Sie bitte auf Mein Profile---> Mein Gerät mit der Waage koppeln.

### Bei Schwierigkeiten bei der Kopplung der APP mit der Waage:

1. Gehen Sie in der APP auf die Registerkarte „Mein Profil“ und wählen Sie „Gerät“ aus.
2. Falls Ihre Waage nicht angezeigt wird, wählen Sie „+“ in der rechten oberen Ecke der APP aus.
3. Die APP wird dann nach einem neuen Gerät suchen.
4. Ihre Waage sollte direkt angezeigt werden.
5. Falls nicht, prüfen Sie, ob die Bluetooth-Verbindung für diese APP freigegeben ist.

## Bedienungsanleitung

6. Wenn die Einstellungen vorgenommen wurden, starten Sie die Gerätesuche neu. Die verbundene Waage "Meine Waage" sollte angezeigt werden. Wählen Sie sie aus und Sie sind verbunden.

### **Zur richtigen Messung der verschiedenen Körperdaten:**

1. Stellen Sie die Waage auf einen trockenen und festen Untergrund (Teppiche vermeiden), um zuverlässige Ergebnisse zu erhalten.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones.
3. Öffnen Sie die App, die Verbindung sollte automatisch hergestellt werden.  
Hinweis: Verbinden Sie zu einem Zeitpunkt nur ein Smartphone mit der Waage.
4. Stellen Sie sicher, dass Ihre Startseite „Verbunden“ ausgibt.
5. Bleiben Sie in der App auf der Startseite oder klicken Sie auf „Messen“.
6. Stellen Sie sich langsam auf die Waage, barfuß mit trockenen Füßen. Stellen Sie sich aufrecht auf die Waage und berühren Sie gleichmäßig die Elektroden.
7. Die Zahlen der Anzeige blinken auf während die Waage die Messung vornimmt und alle Daten analysiert.

Ihr Handy oder Tablet bezieht dann die gemessenen Körperinformationen und zeigt „FERTIG“ unter Ihrem Gewicht an.

### **Bestimmen Sie den Anteil von Wasser und Fett im Körper, die Muskel- und Knochenmasse, berechnen Sie den Body-Mass-Index (BMI):**

1. Stellen Sie die Waage auf einen trockenen und festen Untergrund (Teppiche vermeiden), um zuverlässige Ergebnisse zu erhalten.
2. Drücken Sie leicht auf die Waage, sie wird sich automatisch einschalten.
3. Das Display zeigt nach einigen Sekunden „0,0“ an.  
Zu diesem Zeitpunkt blinkt das Bluetooth®-Symbol auf, was darauf hinweist, dass die Bluetooth®-Funktion auf eine Verbindung und die Kopplung wartet (falls nichts angezeigt wird, überprüfen Sie bitte, ob die Batterien korrekt eingelegt sind).

### **Einstellung der Gewichtseinheit:**

Im Setup/Extras-Menü können Sie die gewünschte Gewichtseinheit (kg, lb, st) auswählen. Wählen Sie Kilogramm „kg“ aus.

### **Sprachauswahl:**

Die APP wird automatisch die Sprache des Smartphones wählen, es sei denn diese Sprache ist in der APP-Auswahl nicht verfügbar. In diesem Fall wird automatisch Englisch ausgewählt.

### **Meine Waage:**

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Smartphone mit Ihrer Waage koppeln, falls die automatische Verbindung fehlgeschlagen ist.

## Bedienungsanleitung

- Login: Startet die Suche. Die APP wird für eine Verbindung Waagen aus einer Referenzliste suchen.
  - Wählen Sie in der Referenzliste Ihre Waage aus. Die APP wird Ihre Waage mit Ihrem Smartphone verbinden.
  - Abmelden: Wählen Sie Ihre Waage aus der Liste der verbundenen Geräte aus. Die APP wird die Verbindung zwischen Ihrem Smartphone und der Waage trennen.
- 
1. Stellen Sie sich barfuß und in Kontakt mit den Sensoren auf die Waage, ohne sich zu bewegen.
  2. Wenn das Gewicht berechnet wurde, werden die Zahlen auf dem Display aufblinken, und die sonstigen Werte werden daraufhin automatisch berechnet.
  3. Bleiben Sie auf der Waage unbeweglich in Position stehen, bis diese sich ausschaltet oder bis alle Werte sind in der APP auf Ihrem Smartphone angezeigt werden.
  4. Diese Werte werden im Menü in der unten dargestellten Reihenfolge angezeigt:
    - GEWICHT
    - BMI (Body Mass Index)
    - Körperfettanteil
    - MUSKELMASSE
    - WASSERGEHALT
    - KNOCHENMASSE
    - MMI (MUSKELMASSE-INDEX)
    - BMR (GRUNDUMSATZ)
  5. Neben Ihren Werten wird weiter angezeigt, ob diese dem „Standard“-Durchschnitt entsprechen oder im Verhältnis zu den Durchschnittswerten „zu hoch“ oder „zu niedrig“ sind.
  6. Sie können daraufhin diese Werte auswählen, um weitere Informationen zu einem dieser Werte zu erhalten.

### **Gewicht in der Speicherfunktion:**

Diese Funktion ermöglicht Ihnen:

- Die Eingabe des Idealgewichts. Und Erinnerung bei jedem APP-Aufruf, wie Sie Ihr Idealgewicht erreichen können.
- Zwei Gewichte im Speicher halten

### **Sonstige Funktionen:**

#### **Statistiken:**

Sie können ebenfalls Ihre Tages-, Monats- und Jahresstatistiken im Hauptmenü aufrufen.

Ziehen Sie dazu den Bildschirm von unten nach oben, das Menü wechselt auf die zweite Seite.

Sie können über die Menüeinstellung/Extras zusätzliche Funktionen nutzen. Kehren Sie wieder zurück in die Menüeinstellungen/Extras, indem Sie die „Zurück“-Taste in dem jeweiligen Menüfenster betätigen.

# LIVOO

Feel good moments

## Bedienungsanleitung

### Teilen:

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Werte mit Ihrer Familie, Freunden und Bekannten über verschiedene Plattformen teilen.

### Feedback-Informationen:

Hier können Sie Ihr Feedback abgeben.

### Fehlermeldungen:

Ein Beispiel für Fehlermeldungen, die auf dem Display angezeigt werden könnten.

| Display | Signification                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LO      | Bitte legen Sie neue Batterien ein, wenn „LO“ auf dem Display der Waage angezeigt wird. Es bedeutet, dass die Batterien entladen sind.                                                                                               |
| Err     | Bitte steigen Sie von der Waage, wenn „Err“ angezeigt wird, um eine Beschädigung der Waage zu vermeiden. Es bedeutet eine Überlastung der Waage. Bitte beachten Sie, dass die maximale Belastungskapazität 180 kg (400 lbs) beträgt. |
| C       | Fehler während der Messung. Bitte steigen Sie von der Waage und stellen Sie sich erneut auf die Waage, um den Messvorgang zu wiederholen.                                                                                            |

### Falsche Spezifikationen:

| Spezifikationen                                                    | Mögliche Erklärungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unrealistische Werte für den Körperfettanteil und den Wasseranteil | Körperfett enthält wenig Wasser. Dies könnte bedeuten, dass der Wasseranteil im Körper unter den festgelegten Grenzwerten für Personen mit hohem Körperfettanteil liegt.<br>Im Gegensatz dazu könnten die Grenzwerte in gut trainierten Sportlern aufgrund des geringen Fettanteils und einem hohen Anteil an Muskelmasse überschritten werden.                                              |
| Falsches Gewicht                                                   | Die Waage wurde auf einen instabilen Untergrund gestellt (z. B.: Teppich).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Keine Analysewerte werden angezeigt.                               | Korrigieren Sie die Position Ihrer Füße. Diese müssen barfuß, trocken und auf den Metallteilen ordnungsgemäß positioniert sein.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| The scale is producing inconsistent weight                         | Prüfen Sie, ob die Waage auf einer harten, ebenen Fläche steht. Überprüfen Sie jeden Sensorfuß auf der Rückseite, um sicherzustellen, dass nichts an der Unterseite klebt. Entfernen Sie die Batterien, um die Waage neu zu starten                                                                                                                                                          |
| Die App zeigt das falsche Fett-Muskel-Verhältnis an                | Die Einstellung der Körperparameter ist falsch, überprüfen Sie, ob Sie das richtige Geschlecht, die richtige Größe und das richtige Alter eingegeben haben.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Keine Körperfettdaten beim Wiegen gemessen                         | Der Benutzer muss barfuß sein, um das Körperfett zu messen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Füße und die Waage beide trocken sind. Die Waage beendet das Wiegen nicht, wenn die Zahlenanzeige blinkt (bleiben Sie etwa 10 Sekunden auf der Waage stehen, bis die Zahl auf der Anzeige aufhört zu blinken). Bluetooth ist nicht eingeschaltet. Bluetooth ist mit einer anderen Waage gekoppelt. |



Feel good moments

## Bedienungsanleitung

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bluetooth nicht verbunden | Die Waage und das Smartphone müssen beide Bluetooth eingeschaltet haben. Überprüfen Sie die Betriebssystemversion Ihres Smartphones, es muss iOS 8.0 oder höher/Android 6.0 höher sein. Klicken Sie auf Ich--->Mein Gerät, um die Waagen-ID zu finden. |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Warum ist das Internet notwendig, damit die APP ordnungsgemäß funktioniert?

Die Fitdays-APP hilft Ihnen, alle Ihre Messungen über einen Server zu speichern. Deshalb ist es wichtig, dass die Internet-Funktion auf Ihrem Handy oder Tablet eingeschaltet ist, für:

1. Die Registrierung und Verbindungsherstellung zu Ihrem Konto.
2. Das Hinzufügen eines neuen Benutzers und Abänderung der Informationen.
3. Das Pairing oder Löschen der Waage.
4. Die Abänderung von Einstellungen.

## Zur Verwendung der APP

### Änderung persönlicher Daten

Wählen Sie „Mein Profil“ aus und die verschiedenen Profile, die Sie auf Ihrer APP gespeichert haben, werden angezeigt. Wählen Sie Ihre Angaben aus. Sie können dann Ihre persönlichen Daten ändern. Nachdem Sie die Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf „Bestätigen“.

### Verwendung des Baby-Modus

Klicken Sie auf „Analyse“ und wählen Sie „+“ in der oberen rechten Ecke aus. Wählen Sie dann „Baby-Modus“ aus. Stellen Sie sich zunächst alleine auf die Waage, um zuerst das Gewicht des Erwachsenen zu erfassen. Sobald die Daten auf der Waage nicht mehr aufblinken, steigen Sie von der Waage, dann halten Sie das Baby im Arm und führen eine erneute Messung durch.

Nach der Fertigstellung wird die Waage das Gewicht des Babys berechnen und ein neues Konto anlegen oder Sie bitten, die Daten manuell zu bestätigen.

Hinweis: Für Benutzer unter 18 Monaten, wechselt die App automatisch in den Baby-Modus, sobald eine Messung ausgeführt wird.

## Reinigung und Wartung


### ACHTUNG !

- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder scheuernden Gegenstände zur Reinigung der Waage, da dies die Oberfläche beschädigt.
- Reinigen Sie die Oberfläche der Waage mit einem weichen, feuchten Tuch.

## Bedienungsanleitung

- Falls Sie die Waage über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, entnehmen Sie die Batterien und lagern sie an einem trockenen Ort. Halten Sie sie vor direkter Sonneneinstrahlung fern und bewahren sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

### Batterienutzung und Recycling-Hinweise:

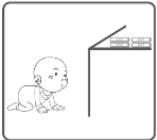


\* Batterien dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen.



\* Verwenden Sie in dem Gerät keine alten und neuen Batterien verschiedener Marken oder mit unterschiedlichen Zusammensetzungen zu gleichen Zeit, um mögliche Lecks oder Explosionen zu vermeiden.

\* Setzen Sie die Batterien keiner Wärme aus, verhindern Sie Verformungen der Batterien und bringen Sie diese nicht in Kontakt mit Feuer.

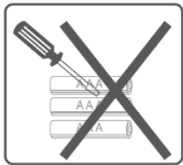

\* Die Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgen.

\* Bitte erkundigen Sie sich bei Ihren örtlichen Behörden über Ratschläge zum Batterie-Recycling. Für den Umweltschutz und zur Entsorgung von Batterien gemäß den geltenden Vorschriften: Die Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Entsorgen Sie die Batterien

in einem ausgewiesenen Sammelbehälter oder bringen Sie die Batterien zurück zu Ihrem Händler.

### EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir, DELTA, BP61071, 67452 Mundolsheim - Frankreich, erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass der Artikel, Bluetooth®-kompatible Badezimmerwaage, DOM428, die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen erfüllt. Dieses Produkt erfüllt die wichtigsten Anforderungen und andere einschlägige Bestimmungen der RED-Richtlinie 2014/30/EU.

# LIVOO

Feel good moments

## Bedienungsanleitung



### Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



### Entsorgung von Batterien und abgenutzten Akkumulatoren (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und in anderen Ländern mit europäischen Systemen getrennter Sammlung)

Dieses Symbol auf Batterien und Akkumulatoren oder auf Verpackungen zeigt an, dass mit diesem Produkt gelieferte Batterien und Akkumulatoren nicht einfach mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Indem Sie diese Batterien und Akkumulatoren in einer angemessenen Weise entsorgen, beteiligen Sie sich aktiv an der Verhinderung der negativen Folgen, die eine unsachgemäße Entsorgung solcher Produkte auf die Umwelt und auf die menschliche Gesundheit haben könnte. Das Recycling von Materialien trägt auch zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei.

Für die Produkte, die aus Sicherheitsgründen zur Erhaltung der Leistung oder Integrität von Daten eine permanente Verbindung zu einer Batterie oder einem Akkumulator benötigen, ist es sinnvoll, diese zur Prüfung zu einem technischen Kundendienst zu bringen.

Indem Sie Ihr elektrisches Gerät am Ende seiner Lebenszeit zu einer geeigneten Sammelstelle zurückbringen stellen Sie sicher, dass die Batterie oder der eingebaute Akku korrekt behandelt werden.

Für alle anderen Szenarien, um Batterien oder Akkumulatoren völlig sicher aus Ihrem Gerät zu entfernen, beziehen Sie sich auf das Benutzerhandbuch. Bringen Sie Batterien oder abgenutzte Akkumulatoren zu einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling zurück.

Für weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts oder Batterien und Akkumulatoren, können Sie Ihre Gemeinde,



Pour en savoir plus :

[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

## LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto kein Vertrag.
- Aus Sorge um die Qualität seiner Produkte behält sich der Hersteller das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.